

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

**MASECZKI MEDYCZNE**

**CHARAKTERYSTYKA**

**MASECZKI MEDYCZNE** są niesterylnym wyrobem medycznym przeznaczonym do ochrony dróg oddechowych (nos, usta).

**Wyrób składa się z:**

- Trzywarstwowej części ochronnej i filtrującej wykonanej z polipropylenu;
- Noska umożliwiającego dokładne dopasowanie maseczki do kształtu twarzy;
- Gumki do mocowania maseczki przy uszach.

**WSKAZANIA**

Wyrób przeznaczony jest do stosowania jako ochrona dróg oddechowych przed zakażeniami roznoszonymi drogą kropelkową, w czasie wzmożonych zachorowań na ww. infekcje oraz do standardowo wykonywanych procedur medycznych, wymagających ochrony dróg oddechowych, np. zabiegi stomatologiczne.

**PRZECIWWSKAZANIA**

Nie ma informacji odnośnie uczulającego działania wyrobu, jednak należy zachować ostrożność w przypadku uczulenia na polipropylen.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Maseczki pakowane w opakowania po 50 szt. Aby użyć wyrób należy:

1. Otworzyć opakowanie w wyznaczonym miejscu;
2. Wyjąć 1 szt. wyrobu;
3. Założyć gumki na uszy;
4. Dopasować maseczkę tak by osłaniała usta oraz nos;
5. Dopasować wbudowany w górnej części drucik, tak aby maseczka dobrze przylegała do nosa.

**UWAGI**

1. Wyrób w stanie niejałowym.
2. Należy zachować ostrożność podczas otwierania opakowania aby nie zanieczyścić pozostałych maseczek.
3. Maseczka przeznaczona jest tylko do jednorazowego użytku.

4. Nie stosować po upływie daty ważności.
5. Nie stosować, gdy opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
6. Zmieniać maseczkę przynajmniej raz na godzinę lub do każdej procedury medycznej.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Nie stwierdzono żadnych komplikacji podczas używania maseczek ochronnych.




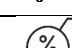




W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników należy zaprzestać stosowania, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Warunki przechowywania maseczek medycznych powinny spełniać następujące wymagania:

1. Nie wystawiać na działanie UV i promieni słonecznych;
2. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C;
3. Zakres wilgotności 30 – 80%;
4. Przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem i uszkodzeniem chemicznym lub mechanicznym.

**SYMBOLE UŻYTE NA OPAKOWANIU**

	WYRÓB NIEJAŁOWY
	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 5°C – 30°C
	PRZECHOWYWAĆ W WARUNKACH ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED ZAMOCZENIEM
	ZAKRES WILGOTNOŚCI 30-80%
	NIE UŻYWAĆ POWTÓRNIE
	CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM SŁONECZNYM
	RODZAJ OPAKOWANIA
	NIE ZAWIERA LATEKSU